

Otinova® ørespray

06-2020

Indhold og holdbarhed

Indhold:
Flaske med 15 ml opløsning
(ca. 150 pumpninger).

Medicinsk udstyr, kl. 1

Holdbarhed efter åbning:
6 måneder ved stuetemperatur.

Varenr.: 92510

Referencer

1. Jinnouchi et al., 2011
2. Kashiwamura et al., 1981
3. Lambert et al., 1981
4. Clayton et al., 1990

Yderligere information:

www.otinova.dk

Indikation

Behandler betændelse i øregangen
(ekstern otit, eksem, "svømmerøre").

Produktbeskrivelse

Otinova ørespray er et gennemprøvet og klinisk dokumenteret¹⁻⁴ produkt, der effektivt behandler betændelse i øregangen.

Otinova sælges receptfrit på apoteket.

Indhold og virkningsmekanisme

Otinova indeholder aluminiumacetat og aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), eddikesyre (8,25%), vand, pH 3-4 (Burows opløsning / eddikesur lerjord).

Otinova indeholder ikke antibiotika eller steroider.

Otinova virker lokalt udtørrende, er kløestillende og har en bakterie- og svampedræbende effekt.

Dosering og anvendelse

Otinova sprayeres 1-2 gange i øregangen, morgen og aften. Det er vigtigt at lægge hovedet på skrå efter at have sprayet, så væsken når så langt ind i øregangene som muligt. Tør evt. overflødig væske væk.

Anvendes i max. 7 dage ad gangen.

Otinova ørespray kan anvendes af voksne og børn. Børn under 5 år bør kun behandles efter anbefaling af en læge.

Svie og tilfælde af lokal irritation kan forekomme.

Læs indlægssedlen i pakningen før brug.



ABIGO Pharma A/S
Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse
Tel: 4649 8676
info@abigo.dk • www.abigo.dk

otinova